


シリコントルサーの構造と、材質

- 1本で2種類の硬さのオールシリコンゴム製マッサージグリップです。グリップ部(高硬度部)は、70度の硬さ、先端(低硬度部)は柔らかさを選ぶことができます。
- 耐熱性は、-50℃から250℃の環境下でゴム特有の弾性体を維持します。アイシング、温熱治療などでのご使用が可能です。
- 耐薬品性が優れているため、エタノールなどによる消毒などが可能です。また、温泉などでもご使用できます。

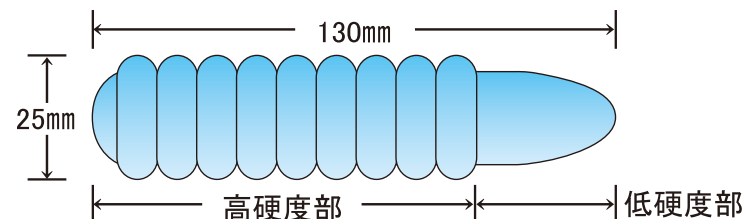

ご使用方法

1. 握る
2. 指を使う
3. 当てる
4. 転がす
5. 擦る
6. その他の使い方も工夫できます

品名・規格	品番	カラー	高硬度部	低硬度部
シリコントルサーノーマル	7050	白	70度	50度
シリコントルサーソフト1	7040	青	70度	40度
シリコントルサーソフト2	7030	オレンジ	70度	30度
シリコントルサーソフト3	7020	ピンク	70度	20度

本製品は、手の外科の可動域における、事故やケガによる癒痕、硬結の除去を目的とした作業療法の補助用具として、1994年に清水順市先生が開発したシリコン製補助用具を、一般市販品にモディファイした製品です。

作業療法、理学療法におけるフリクションマッサージの代替用具として、また、脳血管障害後の訓練や、ハンドセラピーの補助用具としてお使いください。

また、一般的には、美容のためのリフトアップ、シワ予防、スポーツや激しい運動後の筋肉疲労回復、仕事や学習などでスクワークでの首、肩、腕などマッサージの補助具としてお使い下さい。

ご使用上の注意

1. シリコンゴムは静電気を帯びることがあります。埃の付着や、汚れが目立つ場合には、よく水洗し、乾燥させてください。
2. シリコンゴムは、鋭利な刃物などで、裂けることがあります。お取り扱いにはご注意ください。

製品開発者: 清水順市(東京家政大学保健学教授)  
 発売元: サイド・インサイド株式会社  
 住所: 長野県安曇野市明科中川手3767番地1 TEL0263-87-7872  
 URL: <http://www.side-inside.co.jp>