



スライド ポーイ の ふ た を 開 け る

1. 「スライド ポーイ」(携帯型注射針廃棄ケース)(以下 スライドポーイ) のスライドふたの爪かけ部を指でつまみひき上げます。
2. スライドふたを横に滑らせます。

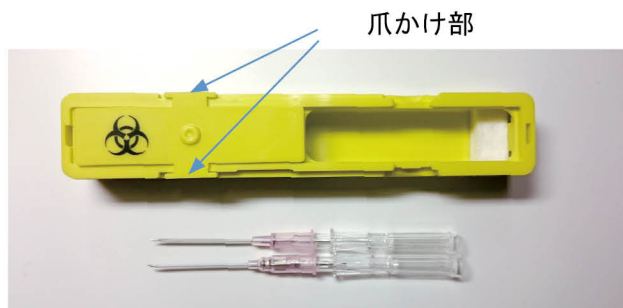

注 射 針 を ス ラ イ ド ポ ー イ に 入 れ る

1. 針先に触れないように、「スライド ポーイ」の中に、注射針の針先が奥になるようにして挿入します。
2. スライドふたを閉じます。
3. スライドふたの爪かけ部を指で押し下げて、確実にふたが閉まっていることをお確かめください。
4. ケースごと、感染性医療廃棄物として適切に処分してください。

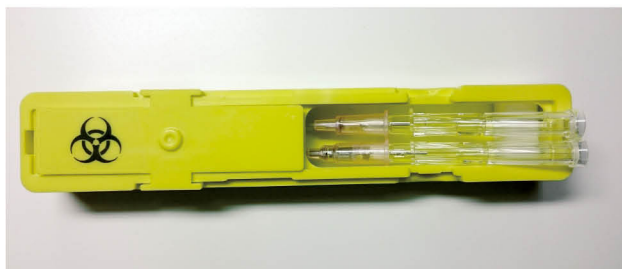

ご使用上の注意

1. 注射針の着脱に際しては、十分に注意し、皮膚に触れないようにしてください。
2. 注射針がとびだしていないか、確認してください。
3. 注射針を入れすぎないでください。目安は、3本までです。
4. スライドふた周辺には血液や、体液が付着することがあります。携行する場合は消毒液で清拭してください。
5. スライドポーイ内部には吸収体がついていますが、必要に応じて脱脂綿などで血液や、体液の漏れを防いでください。
6. 1回ごと廃棄してください。

製品開発者: 有限会社等々力製作所
 開発協力: 信州大学医学部
 発売元: サイド・インサイド株式会社 TEL0263-87-7872
 住所: 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手3767番地1

SIDE・INSIDE

サイド・インサイド株式会社