

ペン型インスリン自己注入器から「山丸」(別売)でペン型注入器用ディスポーザブル注射針を取り外す

1. ペン型自己注入器針着脱補助具「山丸」(以下 山丸)(別売)でペン型注入器用ディスポーザブル注射針(以下 注射針)を取り外します。

山丸(別売)でペン型注入器用ディスポーザブル注射針を取り外す



山丸(別売)(6色)




ペン針ケース(20ヶ入り)



ペン型インスリン自己注入器針着脱補助具「山丸」から、ペン針ケースに入れる

2. 「山丸」の下に、キャップを開けた「ペン針ケース」を置きます。
3. 針先に触れないように注意しながら、「ペン針ケース」の中に注射針を入れます。
4. 注射針を入れたのち、キャップでふたをします。必ず、キャップが閉まっていることをお確かめ下さい。
5. キャップに感染性医療廃棄物シールで封止します。(同封されているシールは写真と異なる場合があります。1枚ずつはがしてご使用ください。)
6. ケースごと、感染性医療廃棄物として適切に処分してください。

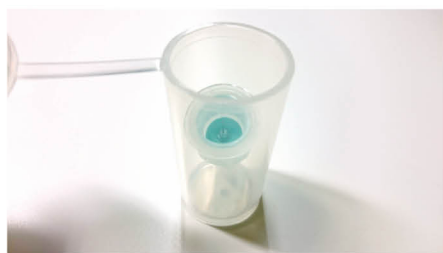

ご使用上の注意

1. 注射針の着脱に際しては、十分に注意し、皮膚に触れないようにしてください。
2. キャップでふたをする際、注射針がとびだしていないか、確認してください。
3. 挿入できるペン型注入器用ディスポーザブル注射針は1ヶです。
4. 1回ごとと廃棄してください。

発売元: サイド・インサイド株式会社 TEL0263-87-7872
住所: 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手3767番地1

SIDE-INSIDE

サイド・インサイド株式会社